

## SET MOTOR + COLCHON ANTIESCARAS EFFECT



Este set de colchón y motor es ideal para pacientes con bajo riesgo de generar úlceras por presión (escaras). Cuenta con cubierta impermeable, un silencioso motor y un regulador de presión de inflado del colchón según el de peso del paciente.

### ESPECIFICACIONES

**Modelo:** Set motor y colchón anti escaras  
**Unidades por empaque:** 1 motor y 1 colchón con mangueras

### Modo de uso

1. Coloque el colchón inflable sobre el colchón de la cama y ponga las extensiones bajo el colchón de la cama para evitar que se deslice.
2. Conecte las mangueras entre el colchón inflable y el motor y conecte a la corriente.
3. Posicione la perilla del motor en el máximo y espere a que se inflen todas las burbujas (no posicione al paciente en el colchón antes).
4. Cubra el colchón con sábanas y ropa de cama. Se recomienda el uso de un “cubre colchón” impermeable para evitar que el colchón se contamine con orina o deposiciones. De todas formas, el colchón es lavable.
5. Antes de subir al paciente, regule la perilla del motor según el peso del paciente.
6. Mantener el colchón prendido las 24 hrs mientras el paciente esté en la cama.
7. Nunca encender el motor con el paciente encima, repetir los pasos antes descritos.

### Nivel de prevención de escaras y peso máximo:

Grado I  
Soporta hasta 110 kg para mantener eficiencia.

### Duración del ciclo de alternancia de inflado de celdas:

9,6 minutos (una vez inflado completamente)

### Materiales de composición

Colchón con 130 celdas inflables.  
Compuesto de nylon PU, impermeable.

### Dimensiones y peso del colchón

Alto de las celdas infladas: 2,5cm  
Ancho colchón: 86 cm  
Largo colchón: 198 cm (no incluye extensiones)  
Peso: 2kg

**Dimensiones y peso del motor**

Alto: 8,5 cm  
Ancho: 12,5 cm  
Largo: 25 cm  
Peso: 1,4 kg

**Fuente de alimentación**

AC 220-240V, 50Hz, 100-120V, 60Hz

**Certificaciones**

ISO9001

**Procedencia**

China

**Garantía:**

6 meses