

Rodillera Rotula con Barras X-TREMUS:

Construido con un tejido con tecnología de vanguardia en 3 Dimensiones combinado con 3 Densidades que está diseñado para la exigencia de deportistas de alto nivel y profesionales. Además de ofrecer un excelente nivel de protección y soporte, esta línea mejora el desempeño atlético y estabilidad de las articulaciones, ayudando a prolongar la vida deportiva de los atletas.

Principales Ventajas:

- Magic Power Band(banda de poder): tejido de alta densidad que preserva y maximiza la energía muscular durante los movimientos de la articulación.
- Contorno Estabilizador: tejido de mediana densidad que entrega mayor estabilidad a la articulación mediante una presión ajustada y precisa, mejorando también la propiocepción.
- Tejido en 3D: tejido elástico en 3 dimensiones (relieves) de alta durabilidad y excelente permeabilidad que ofrecen una gran comodidad.



MARCA:

LP-SUPPORT

CARACTERÍSTICAS:

- Magic Power Band en forma de I sobre la rodilla. Ahorra energía cuando la rodilla se flexiona y potencia la fuerza cuando se extiende.
- Tiene dos bandas de sujeción con velcro para asegurar un mejor ajuste durante la actividad física.
- Soportes a ambos lados de la rodilla para dar mayor apoyo y estabilidad y así prevenir esguinces o lesiones por presiones mal hechas. Sin limitar el rango de acción, ofrece resistencia y amortiguación.
- Tejido de mediana densidad en forma de C a ambos lados de la rótula para dar mayor estabilidad a la rodilla.
- La almohadilla de silicona circular en combinación del tejido de alta densidad también circular, dan aún mayor estabilidad a la rótula y previene su displasia.
- EL tejido de menor densidad con un alto grado de respirabilidad asegura comodidad para usos prolongados y una larga durabilidad.
- El tejido suelto en la zona popliteal aseguran comodidad sin restringir el movimiento



CASA MATRIZ:

ESTADOS UNIDOS

INSTRUCCIONES DE USO:

Paso1: Suelte las bandas de sujeción de velcro. Inserte el pie y sujete la parte de arriba de la rodillera (donde están las 2 líneas grises) con ambas manos y tire hacia arriba. Asegúrese que la almohadilla de silicona quede sobre la rótula y que las barras estabilizadoras estén una a cada lado de la rodilla.

Paso 2: Introduzca la banda a través del asa y asegúrela sobre la misma con el velcro.

INDICACIONES:

- Esguince de ligamento cruzado
- Esguince de ligamento colateral
- Inestabilidad de la rodilla
- Artritis

TALLAS

(Según medida de circunferencia de la rodilla en la rótula con la rodilla estirada):

S	33-36 cms
M	36-39 cms
L	39-42 cms
XL	42-45 cms
XXL	45-48 cms
XXXL	48-51 cms

ADVERTENCIA:

No usar si se ha aplicado sobre la piel aceites o cremas que generen calor. En caso de sensibilidad de la piel o irritación, descontinúe su uso y consulte con un profesional.

COMPOSICION:

55% Nylon, 16% Spandex, 10% Silicona, 3% Acero, 7% Poliacetal, 5% Algodón, 4% Poliuretano

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

Lavar a mano con jabón suave en agua fría. Dejar secar al aire libre. No planchar ni secar en máquina automática.

HECHO EN TAIWAN