

TENS YUWELL SDP 330



La sigla TENS (en inglés) significa estimulación nerviosa eléctrica transcutánea y se usa para el alivio de procesos dolorosos óseos o musculares. El modelo SDP-330 está especialmente diseñado para un uso domiciliario, fácil y amigable para ser usado por el mismo paciente. Cuenta con 3 modos de electroestimulación y 6 según ubicación. Además, cuenta con 10 niveles de potencia. Batería recargable a través de cable USB.

ESPECIFICACIONES

Marca:	YUWELL
Modelo:	SDP 330
Unidades por empaque:	1

Modos según ondas de frecuencia:

- Knock (golpes)
- Press (presión)
- Knead (masaje)

Modos según el lugar de aplicación:

- Shoulder (hombro)
- Arm (brazo)
- Joint (articulación)
- Waist (cintura)
- Leg (pierna)
- Foot (pie)

Niveles de potencia:

- 1 al 3: Fuerza leve corriente ligera para piezas sensibles.
- 4 al 7: Fuerza moderada la elección de las personas que sufren de dolor moderado.
- 8 al 10: Gran fuerza la elección de las personas que sufren de dolor moderado a grave

Tiempo de uso

Se puede utilizar en intervalos de 15 minutos

Precauciones y contraindicaciones:

- Embarazadas
- Personas con problemas de sensibilidad
- Trombosis venosa
- No utilizar sobre heridas
- Marcapasos
- No utilizar cerca del cuello
- No utilizar cerca de órganos genitales

Dimensiones y peso

Largo x ancho x alto: 112 mm x 52 mm x 25 mm..

Peso: 100 gr

Fuente de alimentación

Batería interna recargable con cargador y cable USB.

Carga inicial debe ser por 2 horas y cuenta con una vida útil de 5 años aproximadamente (200 cargas)

Si el equipo se deja en desuso prolongada, cargar cada 6 meses.

Incluye:

Equipo

Bolsa protectora

2 electrodos de larga duración de 9 x 6 cm

Cable conductor

Placa de almacenamiento

Cargador con cable USB

Guía de uso en inglés

Manual de usuario en inglés

Certificaciones

ISO 9001

Procedencia

China

Garantía:

6 meses